




**TRUMPA
INSTRUKCIJA**
Lietuviškai

icare
ic200





TONOMETRO ĮJUNGIMAS IR MATAVIMO ZONDO ĮDĖJIMAS

1. Paspasukite Pasirinkimo arba Matavimo mygtuką, kad įjungti tonometrą. Žemiau parodytas ekrano vaizdas abiem atvejais. (Visada naudokite riešo dirželį)

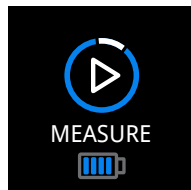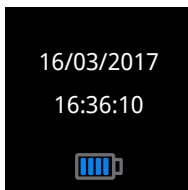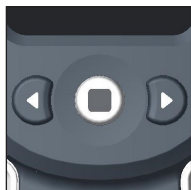


Paspaudus pasirinkimo mygtuką

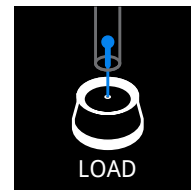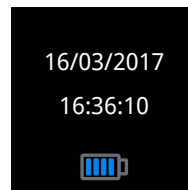

Paspaudus matavimo mygtuką

2. Nuimkite zondo tubulės dantelį ir įdėkite zondą, kaip parodyta žemiau į jam skirtą vietą.

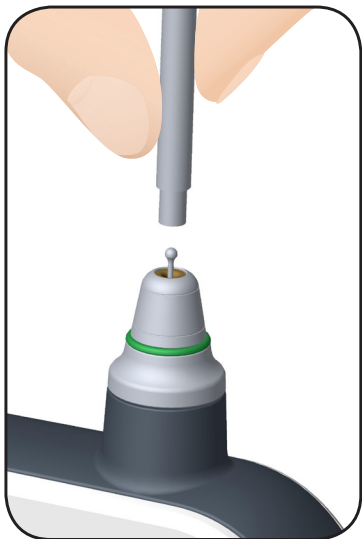

3. Kai tonometro ekrane parodomas grojimo simbolis, pasirinkite akį (OD - dešinė, no information arba OS - kairė) spausdami navigacinius mygtukus. Atlikus pasirinkimą galima tikti matavimą.





*Pasiruošimas
matavimui: akies
pasirinkimas: OD, no
information, OS.*

4. Įsitinkinkite, jog kakta yra tvirtai atremta į tonometrą. Jeigu reikia, pareguliuokite atramą tam skirtu valdymo ratu.

Atstumas tarp zondo ir akies ragenos turėtų būti apie 5 mm.

Pridėkite tonometrą prie paciento akies, kad zondas būtų nukreiptas į ragenos centrą taip, jog kakta būtų prisilietusi prie kaktos atramos. Laikykite zoną horizontaliai ir nukreiptą į ragenos centrą. Jeigu reikia, pareguliuokite atramą tam skirtu valdymo ratu. Paciento akispūdis gali būti matuojamas ir gulinčiam ir sėdinčiam pacientui. Paties tonometro bei zondo prie akies spausti nereikia.

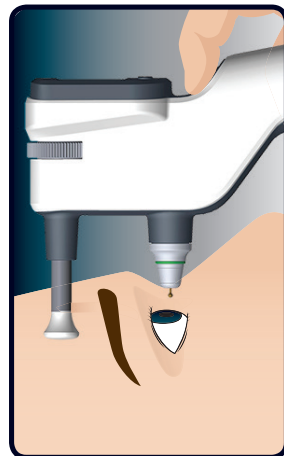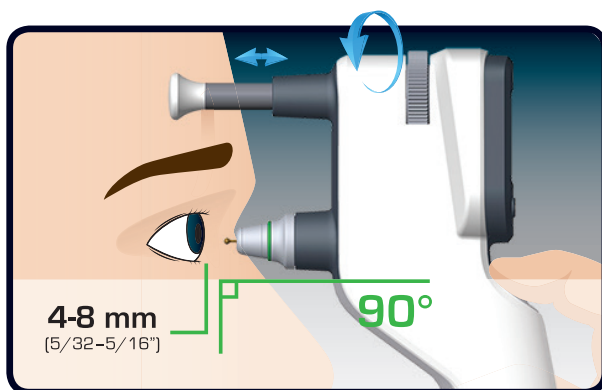

5. Matavimo metu zondas prisilies prie akies: paspauskite ir laikykite matavimo mygtuką atlikti 6 matavimams iš eilės ARBA paspauskite mygtuką 6 kartus atlikti 6 matavimus po vieną. Pilki apskritimo segmentai ant ekrano užsidegs mėlyna spalva vienas po kito.



VIENAS TRUMPAS PYPTELEJIMAS

Praneša apie teisingai atliktą vieną matavimą.


DVIGUBAS PYPTELEJIMAS

Praneša apie neteisingai atliktą vieną matavimą. (Žr. klaidų kodus pilnoje instrukcijoje).

ILGAS PYPTELEJIMAS

Praneša, kad visi šeši matavimai buvo atlikti teisingai ir IOP matavimų vidurkis rodomas ekrane.

EKRANAS MATAVIMO METU

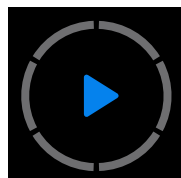

Prieš



Po antrojo matavimo



Po šeštojo matavimo




Po šeštojo matavimo, bet su leistina paklaida



Po šeštojo matavimo, bet su per didele paklaida

TONOMETRO DALYS

1. Kaktos atrama
2. Zondo bazė
3. Bazės žiedas
4. Ekranas
5. Kaktosatramos reguliavimo rankenėlė
6. Valdymo mygtukai
7. Pasirinkimo mygtukas
8. Matavimo mygtukas

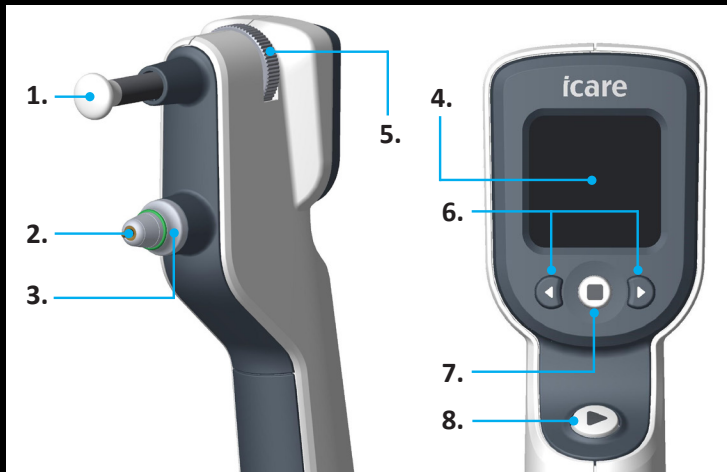

REGULIARUS ZONDO BAZĖS PAKAITIMAS IŠVENGIANT BEREIKALINGOS PATIKROS

ZONDO BAZĖS PAKAITIMAS

1. Atjunkite maitinimą nuo tonometro.
2. Ranka atsukite bazės žiedą ir saugiai jį atidėkite į šoną.
3. Ištraukite zondo bazę naudodami tik pirštus - jokių kitų papildomų įrankių.
4. Įdėkite naują zondo bazę į tonometrą.
5. Priverškite žiedą tvirtai, kol jis prisitvirtins prie zondo bazės.

